


Smell Diskettes[®]

Olfaction Test

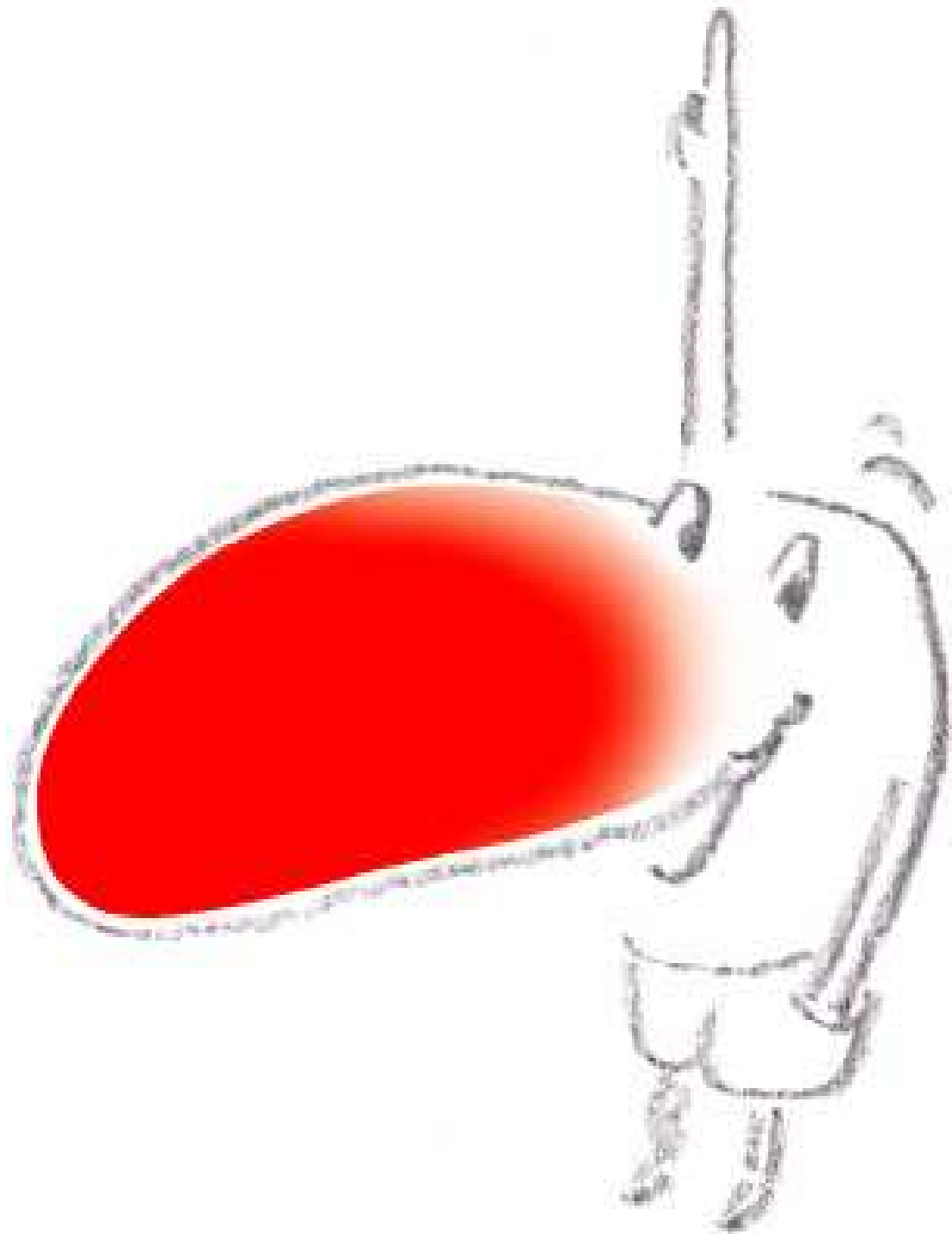

SmellDiskettes Olfaction Test



Modo de emprego

O «Olfaction Test» é um teste de despistagem destinado a testar o bom funcionamento do olfato.

O teste contém 8 discos com odores diferentes, assim como, um questionário que pode ser utilizado pelo próprio paciente.

Realização do teste

Não comer, beber ou fumar nos 15 minutos que antecedem o teste para não influenciar os resultados.

O teste pode ser efetuado pelo próprio paciente.

Abra a disquete nº 1, aspire profundamente através de ambas as narinas e volte a fechar a disquete. (Caso o teste seja feito com apenas uma narina, a outra deve permanecer fechada pressionando-a com o dedo).

Selecione uma de entre as 3 respostas possíveis no questionário da disquete nº 1.

Se o paciente não conseguir sentir qualquer cheiro, deverá colocar uma cruz na resposta que lhe parecer mais correcta.

Siga o mesmo procedimento para as restantes disquetes.

Instruções especiais

Este teste de investigação pode ser utilizado com grande fiabilidade para diferenciar os pacientes com uma função olfactiva normal, daqueles com hiposmia ou anosmia.

Poderão ser efetuadas provas mais detalhadas mas apenas para determinar o grau de hiposmia do paciente.

Higiene

As disquetes devem ser usadas sem haver contacto com o nariz do paciente. **Contudo, se alguma das disquetes for contaminada, a mesma deve ser substituída.**

Tempo de vida das disquetes

O uso normal das disquetes permite-lhe um tempo de vida de seis meses, contados a partir da data da primeira utilização. Caso as disquetes não sejam fechadas corretamente após cada utilização a sua vida útil diminui substancialmente.

Mantenha as disquetes bem fechadas após cada utilização em lugar fresco e seco.

Evite o contacto com os olhos para evitar irritações.

Resultados do teste

Respostas corretas:

- 1 – Café
- 2 – Baunilha
- 3 – Pêssego
- 4 – Erva
- 5 – Ananás
- 6 – Rosas
- 7 – Chocolate
- 8 – Peixe

Atribua **1 ponto** por cada resposta certa e **0 pontos** por cada resposta incorrecta.

O resultado do teste é o total de pontos entre **0 e 8**.

Interpretação do resultado do teste

7 – 8 pontos. Capacidade olfactiva normal.

0 – 6 pontos. Hiposmia, anosmia ou ausência de colaboração durante o teste.

Para encomendar: encomendas@sipaco.com

Ou

Telemóvel : 961 086 524

